


Cómo crear PROTOCOLOS de pruebas.

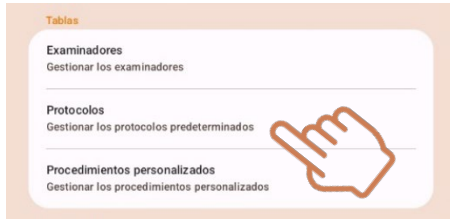


1- Pulsar icono para crear un nuevo protocolo.



2- Selecciona el tipo de protocolo según la sesión en la que quieres que aparezca




4- Selecciona las pruebas que quieras incluir.

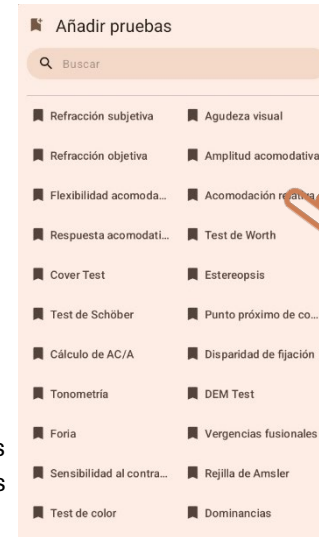


Pulsación larga: seleccionar varias



Pulsación larga sobre una prueba ya introducida en el protocolo nos permite modificar los valores por defecto

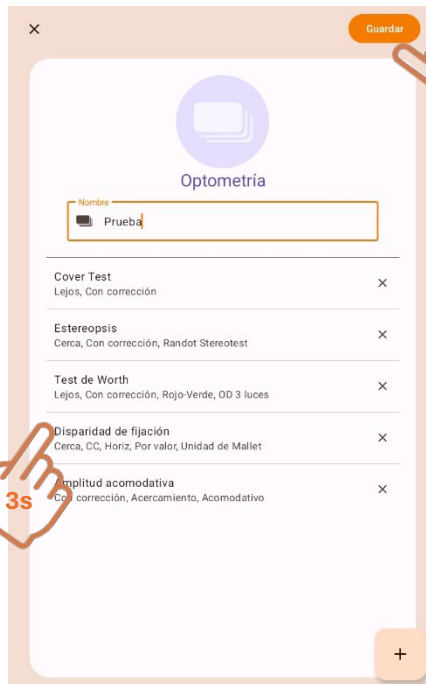


5- Una vez seleccionadas las pruebas y puesto el nombre, pulsar GUARDAR.

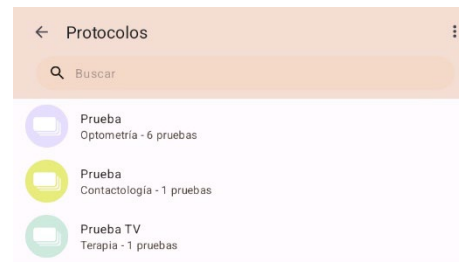

Los protocolos se guardan con el icono del color correspondiente al tipo de sesión elegido.

Una vez creados se pueden BORRAR y EDITAR.

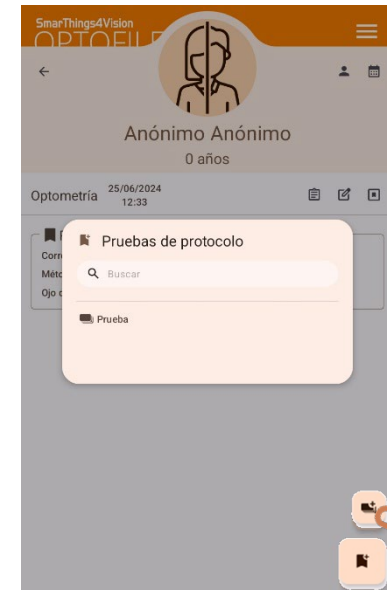

Botón de selección de protocolos creados dentro de la sesión del paciente